

Příloha 2 - Pokyny pro učitele k provedení odběru

RESALIVA odběrová souprava

Návod k použití



Před samotným odběrem **30 min.** nejzte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa.




Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.



Opatrně otevřete zkumavku s tyčinkou na sliny.



Tyčinku vložte do úst.

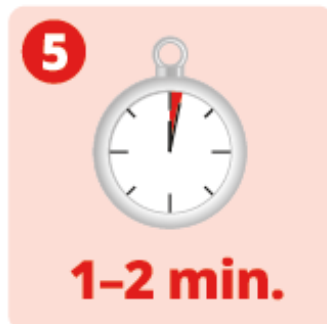

Tyčinku nechte v ústech **1-2 min.** bez žvýkání.



Tyčinku ústy vložte do zkumavky.



Zkumavku pořádně zavřete.



Na zkumavku nalepte přiložený čárový kód, tak aby byl pouze na dolní části odběrové zkumavky.



Zkumavku vložte v igelitovém sáčku do obálky a odešlete do laboratoře.

Katalogové číslo **GS-316** Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com